

LYCRAN



Ψυχρού πολυμερισμού ρητίνη σε μεθυλομεθακρυλική βάση.

<< Βήμα προς βήμα οδηγίες χρήσεως >>



Feguramed GmbH
Jahnstr. 2
74722 Buchen Germany
Tel. +49 6281 5227-0 fax -15
www.feguramed.com

CE0482 Made in Germany



- Προετοιμάστε το εκμαγείο με τα κεριά και τα δόντια ως συνήθως.
- Κόψτε την βάση του εκμαγείου με γωνία 85°. Δείτε φωτογραφία.



- Προσαρμόστε το εκμαγείο στο μούφλο. Δείτε φωτογραφία.
- Σταθεροποιήστε το στην μεταλλική βάση με την βοήθεια κεριού.



- Προσαρμόστε το διαφανές πάνω τμήμα του μούφλου.
- Κλείστε το μούφλο με την χρήση των δύο σιδερένιων κουμπωμάτων.



- Ανακατέψτε την σιλικόνη ντουμπλαρίσματος Fegura® Sil Lycran (κωδ. LY0140). Χρόνος ανάμιξης 1 λεπτό.
- Ρίξτε την σιλικόνη αργά, μέσα από την τρύπα στο πάνω τμήμα του μούφλου.
- Σημείωση: 180γρ. από το μέρος Α και 180γρ. από το μέρος Β, είναι αρκετά για ένα γέμισμα.





- Σταματήστε όταν η σιλικόνη γεμίσει τις τρύπες.
- Χρόνος πήξης 30 λεπτά.



- Βγάλτε την βάση του μούφλου.
- Προσεκτικά ξεμουφλάρετε και το εκμαγείο.



- Προετοιμάστε τους αγωγούς χύτευσης, τρυπώντας με το ειδικό εργαλείο.
- Για την πάνω και για την κάτω γνάθο 3 κανάλια χύτευσης είναι απαραίτητα.
- Προτείνουμε τις θέσεις, όπως εικονίζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

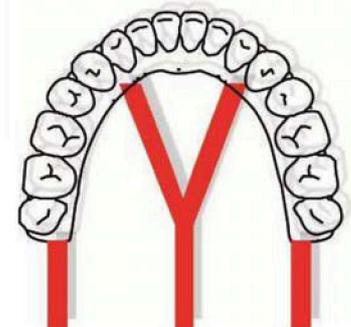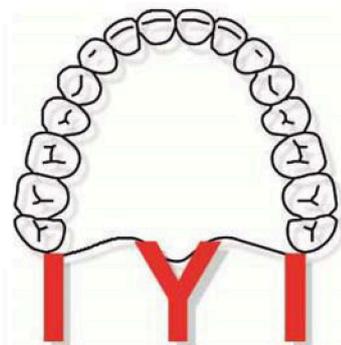



- Απομακρύνετε τα κεριά από τα δόντια και το εκμαγείο.
- Αδροποιήστε τα δόντια και τοποθετήστε τα ξανά στην φόρμα ντουμπλαρίσματος.



- Τα αδροποιημένα δόντια μπορούν να καλυφθούν με ένα λεπτό στρώμα από τον συγκολλητικό παράγοντα Lycran Bond (κωδ. LY0160).
- Αφήστε να στεγνώσουν για 2-3 λεπτά.



- Τοποθετήστε τα στεγνά εκμαγεία σε ζεστό νερό 50-60 °C για 10-15 λεπτά. (Το νερό εμποδίζει την εισχώρηση φυσαλίδων αέρα από το εκμαγείο στο ακρυλικό κατά την διάρκεια του πολυμερισμού).
- Απλώστε δυο φορές το διαχωριστικό Lycran (κωδ. LY0180) με το ειδικό πινέλο.



- Μόλις στεγνώσει το διαχωριστικό τοποθετήστε το εκμαγείο στην φόρμα ντουμπλαρίσματος.
- Κλείστε το μούφλο μαζί με την βάση του.



- Ανακατέψτε το ακρυλικό Lycran (κωδ. LY0100) στον ειδικό μετρητή (κωδ. LY0330), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Σημείωση: Για μία οδοντοστοιχία απαιτούνται 20γρ. σκόνη και 12γρ. υγρό.
- Το μείγμα Lycran μπορεί να χυθεί στην σιλικόνη σε 2-3 λεπτά κατά την διάρκεια του χρόνου επεξεργασίας του.



- Όταν η επιφάνεια του ακρυλικού σκληρύνει (μετά από περίπου 5-6 λεπτά), τοποθετήστε το μούφλο μέσα σε μια συσκευή πολυμερισμού.
- Το μούφλο θα πρέπει να καλυφθεί τελείως από το νερό.



- Χρόνος πολυμερισμού 30 λεπτά.
- Πίεση 2-3 bar.
- Θερμοκρασία 45 °C.



- Μετά τον πολυμερισμό βγάλτε την βάση και απομακρύνετε το εκμαγείο.



- Βγάλτε την οδοντοστοιχία από το εκμαγείο.
- Τελειώστε ως συνήθως.
- Συστήνεται το σαπούνι Feguroi KU100 (κωδ. 8078-200) για προγυάλισμα και η κρέμα γυαλίσματος PROOFIX (κωδ. P8000) για τελικό γυάλισμα.

Τέλειο αποτέλεσμα!

