

ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ για αφαίρεση σπασμένων εμφυτευματικών βιδών


Μια σπασμένη βίδα μέσα σε ένα εμφύτευμα είναι ένα σοβαρό, αν και όχι τόσο συχνό πρόβλημα. Με το ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ, μπορείτε να αφαιρέσετε το σπασμένο κοχλιωτό θραύσμα από το εμφύτευμα εάν δεν έχει κολληθεί ή εάν το εσωτερικό σπείρωμα του εμφυτεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά σε προηγούμενη προσπάθεια αφαίρεσης. Στο 90% των περιπτώσεων η σπασμένη βίδα μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί, αλλά η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη επιδεξιότητα, υπομονή και προσοχή. Ο χρόνος που απαιτείται για την αφαίρεση μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του εμφυτεύματος που μπορεί να διευκολύνει ή να περιπλέξει τη διαδικασία. Μόλις αφαιρεθεί η βίδα, τα υπολείμματα της πρέπει να αφαιρεθούν από το εμφύτευμα με αέρα, νερό και αναρρόφηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά τη χρήση είναι υποχρεωτική η ψύξη του ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Α), της ΟΝΥΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΡΕΖΑΣ (C) και της ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ (D), με πολύ νερό για να μην υπερθερμανθεί το εμφύτευμα. Κατά συνέπεια, το οστό προστατεύεται από τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και νέκρωσης. Η αποτελεσματικότητα της ΟΝΥΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΡΕΖΑΣ και της ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ είναι βέλτιστη για τρεις εξαγωγές σπασμένων βιδών. Η ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ είναι εξαιρετικά σκληρή αλλά εύθραυστη στην κάμψη. Προκειμένου να αποφευχθεί η θραύση της, είναι απολύτως απαραίτητο το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ να μην κινείται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Για ορισμένους τύπους εμφυτευμάτων το ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ είναι σε απόθεμα. Για τους υπόλοιπους τύπους, ο χρόνος παραγωγής και παράδοσης του είναι περίπου 10 εργάσιμες ημέρες.




Ακτινογραφία του σπασμένου τμήματος της βίδας

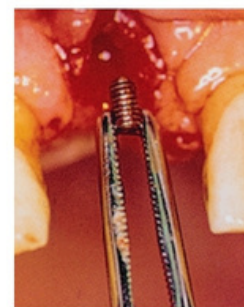

Αφαίρεση της σπασμένης βίδας



Η σπασμένη βίδα αφαιρέθηκε

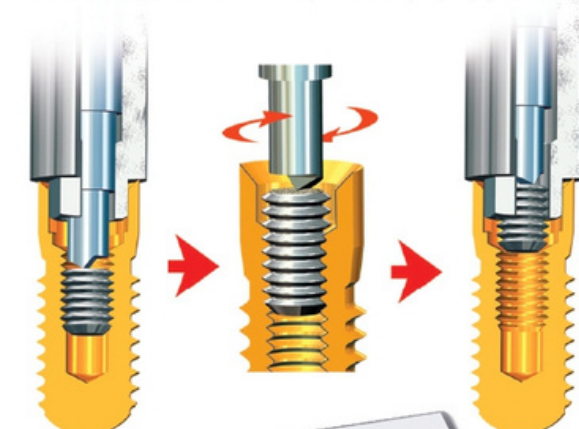

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ:

- Εμφυτεύματα εσωτερικού εξαγωγού (τύπου SCREW VENT και συμβατά)
- Εμφυτεύματα εξωτερικού εξαγωγού (τύπου BRANEMARK και συμβατά)

Φρέζα αντίστροφης κοπής (D)


Ονυχοειδής φρέζα (C)

Εργαλείο χειρός (B)

Εξάρτημα κεντραρίσματος (A)



Η ΟΝΥΧΟΕΙΔΗΣ ΦΡΕΖΑ (C) τοποθετημένη στο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ (B) για χειροκίνητη αφαίρεση της σπασμένης βίδας.

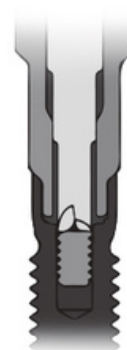

Ονυχοειδής φρέζα (C)



Φρέζα αντίστροφης κοπής (D)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- A ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
- B ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ
- C ΟΝΥΧΟΕΙΔΗΣ ΦΡΕΖΑ
- D ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ για αφαίρεση σπασμένων εμφυτευματικών βιδών

Μια σπασμένη βίδα μέσα σε ένα εμφύτευμα είναι ένα σοβαρό, αν και όχι τόσο συχνό πρόβλημα. Με το ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ, μπορείτε να αφαιρέσετε το σπασμένο κοχλιωτό θραύσμα από το εμφύτευμα εάν δεν έχει κολληθεί ή εάν το εσωτερικό σπείρωμα του εμφυτεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά σε προηγούμενη προσπάθεια αφαίρεσης. Στο 90% των περιπτώσεων η σπασμένη βίδα μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί, αλλά η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη επιδεξιότητα, υπομονή και προσοχή. Ο χρόνος που απαιτείται για την αφαίρεση μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του εμφυτεύματος που μπορεί να διευκολύνει ή να περιπλέξει τη διαδικασία. Μόλις αφαιρεθεί η βίδα, τα υπολείμματα της πρέπει να αφαιρεθούν από το εμφύτευμα με αέρα, νερό και αναρρόφηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά τη χρήση είναι υποχρεωτική η ψύξη του ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Α), της ΟΝΥΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΡΕΖΑΣ (C) και της ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ (D), με πολύ νερό για να μην υπερθερμανθεί το εμφύτευμα. Κατά συνέπεια, το οστό προστατεύεται από τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και νέκρωσης. Η αποτελεσματικότητα της ΟΝΥΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΡΕΖΑΣ και της ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ είναι βέλτιστη για τρεις εξαγωγές σπασμένων βιδών. Η ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ είναι εξαιρετικά σκληρή αλλά εύθραυστη στην κάμψη. Προκειμένου να αποφευχθεί η θραύση της, είναι απολύτως απαραίτητο το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ να μην κινείται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Για ορισμένους τύπους εμφυτευμάτων το ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ είναι σε απόθεμα. Για τους υπόλοιπους τύπους, ο χρόνος παραγωγής και παράδοσης του είναι περίπου 10 εργάσιμες ημέρες.




Ακτινογραφία του σπασμένου τμήματος της βίδας



Αφαίρεση της σπασμένης βίδας



Η σπασμένη βίδα αφαιρέθηκε

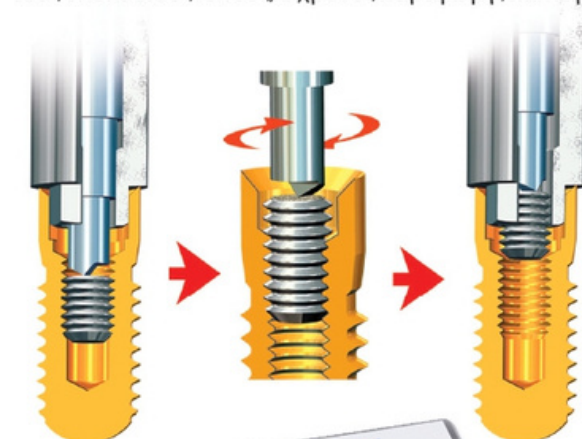

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ:

- Εμφυτεύματα εσωτερικού εξάγωνου (τύπου SCREW VENT και συμβατά)
- Εμφυτεύματα εξωτερικού εξάγωνου (τύπου BRANEMARK και συμβατά)

Φρέζα αντιστροφής κοπής (D)


Ονυχοειδής φρέζα (C)

Εργαλείο χειρός (B)

Εξάρτημα κεντραρίσματος (A)



Η ΟΝΥΧΟΕΙΔΗΣ ΦΡΕΖΑ (C) τοποθετημένη στο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ (B) για χειροκίνητη αφαίρεση της σπασμένης βίδας.

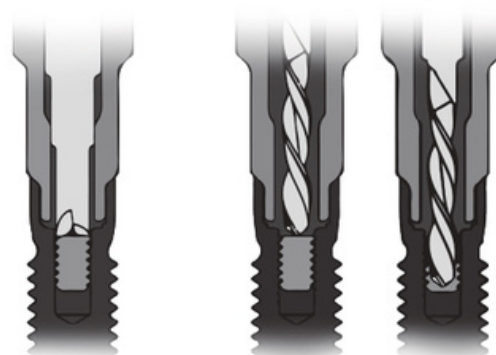

Ονυχοειδής φρέζα (C)

Φρέζα αντιστροφής κοπής (D)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- A ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
- B ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ
- C ΟΝΥΧΟΕΙΔΗΣ ΦΡΕΖΑ
- D ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ