

MC-Bonder

Συνδετικός παράγοντας μετάλλου - πορσελάνης

Το **MC-BONDER** είναι ένας συνδετικός παράγοντας μετάλλου πορσελάνης, για αισθητικές αποκαταστάσεις σε πολύτιμα και μη πολύτιμα κράματα. Το κίτρινο χρώμα μετά το ψήσιμο, καλύπτει το μαύρο χρώμα των οξειδίων και δίνει μία ζεστή κίτρινη βάση στην πορσελάνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

1. Ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να είναι στεγνός και καθαρός.
2. Αμμοβολήστε τον μεταλλικό σκελετό μετά την οξείδωση (δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράματος, π.χ. COMBIBOND® BST TRIUMPH: θερμοκρασία οξείδωσης 960 °C) με οξείδια αλουμινίου **ALUMIX 120 ή 150 μm**.
3. Συνεχίστε με τον καθαρισμό σε ατμό και στεγνώστε με αέρα, καθαρό από νερό και λάδια του κομπρεσέρ.
4. Απλώστε με πινέλο ένα λεπτό στρώμα **MC-BONDER** στον μεταλλικό σκελετό και στεγνώστε το στον φούρνο στους 500 °C για 5 - 7 λεπτά.
5. Μετά το στέγνωμα θερμάνετε τον φούρνο με βάκουμ και με ταχύτητα ανόδου 50 °C/λεπτό μέχρι τους 960 °C και κρατήστε το για 1 - 2 λεπτά.
6. Ανοίξτε τον φούρνο και αφήστε το να κρυώσει. Εάν κρίνετε απαραίτητο απλώστε και ένα δεύτερο λεπτό στρώμα ή συνεχίστε την εργασία ως συνήθως.



Σημαντικό: Μετά το τελευταίο ψήσιμο, ελέγξτε εάν όλες οι επιφάνειες του **MC-BONDER** έχουν καλυφθεί εντελώς με πορσελάνη. Σε αυτήν την περίπτωση, προχωρήστε σε ένα ακόμα ψήσιμο, το οποίο θα σκεπάσει την επιφάνεια αυτή και θα δώσει λαμπρότητα. Μετά από αυτό μην τροχίστε τις γωνίες με λάστιχο.



Μην χρησιμοποιείτε το MC-Bonder μετά την ημερομηνία λήξης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2 ml σύριγγα

ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: 4010

MED/CERT
ISO 9001/EN 46001



ΦΛΩΡΟΣ DENTAL ^{plus}

Εγνατία 88, 54623 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 224-203

www.florosdental.com

FEguramed GmbH

ΥΛΙΚΑ ΧΥΤΗΡΙΟΥ • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

74722 Buchen/Germany • Jahnstr. 2

Τηλ.: 0049 - 6281 - 52 27 0 • FAX: 0049 - 6281 - 52 27 15