

Πώς να καθαρίζετε σωστά τις λούπες σας (και τι να αποφεύγετε)



Οι οδοντιατρικές λούπες είναι εργαλείο ακρίβειας.

Η σωστή φροντίδα τους **δεν αφορά μόνο την υγιεινή**, αλλά και τη διατήρηση της οπτικής καθαρότητας, της εργονομίας και της διάρκειας ζωής τους.

Ακολουθούν **απλές, ασφαλείς οδηγίες καθαρισμού**, βασισμένες στις επίσημες συστάσεις του κατασκευαστή.

✗ Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε ΠΟΤΕ

Η λανθασμένη απολύμανση μπορεί να προκαλέσει **μόνιμη βλάβη** στις λούπες.

- ✗ Μην ξεπλένετε τις λούπες κάτω από τρεχούμενο νερό
- ✗ Μην τις βυθίζετε σε υγρά ή σε υπερηχητικά λουτρά
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με **αμμωνία, χλώριο ή οξέα**
- ✗ Μην αποστειρώνετε σε **αυτόκλειστο (autoclave) ή chemiclave**
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε **Lysol®** ή απολυμαντικά που περιέχουν **γλουταραλδεϋδες ή ιωδοφόρα**

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να καταστρέψουν φακούς, σωλήνες και επιστρώσεις.

✓ Πώς να καθαρίζετε σωστά τις λούπες

Πριν ξεκινήσετε

- Αποσυνδέστε οποιαδήποτε **καλώδια ή φώτα**
 - Βεβαιωθείτε ότι οι λούπες είναι **εκτός χρήσης**
-

Καθαρισμός φακών & σκελετού

- Χρησιμοποιήστε **καθαριστικό γυαλιών** ή
- Ήπιο διάλυμα **νερού με σαπούνι**
- Μαλακό, μη χνουδωτό πανί

Στεγνώστε με μαλακό πανί ή αφήστε να στεγνώσουν φυσικά.

Απολύμανση

- Επιτρέπεται χρήση:
 - **OPTIM 1 Wipes**
 - **CaviWipes**
 - Πανί Admetec
 - Αλκοόλη έως **70%**
- Σκουπίστε **όλες τις εκτεθειμένες πλαστικές επιφάνειες**:
 - σκελετό
 - βραχίονες
 - σωλήνες

Στεγνώστε με μαλακό πανί ή αφήστε να στεγνώσουν φυσικά.

Σημαντική λεπτομέρεια

Αν παραμείνουν υπολείμματα στους φακούς:

- αφαιρέστε τα **απαλά** με μαλακό, καθαρό πανί

Να είστε **ιδιαίτερα προσεκτικοί στους φακούς των λουπών**, καθώς χαράσσονται εύκολα.

Γιατί έχει σημασία η σωστή φροντίδα

Η σωστή καθημερινή φροντίδα:

- διατηρεί **καθαρή εικόνα & ακρίβεια**
 - προστατεύει την **επένδυσή σας**
 - μειώνει φθορές & ανάγκες service
 - εξασφαλίζει **άνεση & εργονομία** σε βάθος χρόνου
-

Συμπέρασμα

Οι λούπες δεν είναι απλό αξεσουάρ.

Είναι **εργαλείο εργασίας υψηλής ακρίβειας** – και αξίζουν την αντίστοιχη φροντίδα.

The logo for admetec, featuring the word 'admetec' in a lowercase, sans-serif font. The 'ad' is in red, and 'metec' is in grey. The 'm' is stylized with a red outline.